

Назначение медицинского изделия

Медицинское изделие предназначено для:

- обеспечения разгрузки груднопоясничного, крестцового отделов позвоночника и копчика;
- обеспечения фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника;
- снятия нагрузки с копчика и мышц поясницы;
- создания дополнительной опоры корпуса тела;
- разгрузки межпозвоночных дисков.

Корсет применяется при длительных статических нагрузках на позвоночный столб при повседневной трудовой деятельности, в послеоперационный период и профилактических целях для освобождения от лишней нагрузки пораженного участка позвоночного столба.

Показания для применения медицинского изделия

Медицинское изделие рекомендуется использовать для ускорения реабилитации больного, после обследования врачом, в случаях:

- радикулита;
- остеохондроза поясничного и пояснично-крестцового отделов позвоночника;
- грыжи межпозвоночных дисков и пояснично-крестцового отдела позвоночника;
- протрузии межпозвоночных дисков;
- профилактики заболеваний поясницы при длительном выполнении малоподвижной, так называемой "сидячей" работы, не связанной с физическими нагрузками - в офисах, конторах, учреждениях;
- восстановления мышечного тонуса в пояснично-крестцовом отделе позвоночника;
- нарушения двигательной функции позвоночника;
- профилактики и лечения сколиозов;
- профилактики и лечения травм поясницы после силовых нагрузок;
- снятия болевого синдрома при воспалении поясничных мышц.

Противопоказания для применения медицинского изделия

Противопоказанием для ношения корсета могут быть:

- беременность;
- синдром портальной гипертензии;
- диафрагмальные грыжи, грыжи брюшной полости.